


## إرشادات حول استخدام شرائط التشخيص


يجب استخدام شرائط التشخيص دائماً في الصباح قبل استخدام المراض للمرة الأولى وقبل الاغتسال.

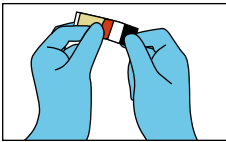

يجب أولاً إزالة الطبقة الواقية المميزة باللون الأسود. للقيام بذلك، أمسك الشرائط المميزة باللونين الأحمر والأبيض.



باعد بين جانبي الأرداف. اضغط على السطح اللاصق المكشوف لشريط التشخيص المميز باللون الأحمر عدة مرات على جلد منطقة الشرج.

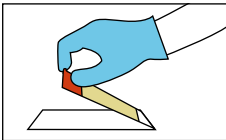

بعد سحب العينة، تثبت شريط التشخيص على شريحة مجهرية؛ بحيث يكون السطح اللاصق مواجهاً للأسفل. ستكون الرقاقة البيضاء عندئذٍ مواجهةً للأعلى.

## هل نتيجة الاختبار إيجابية؟

لا داعي للذعر، فهذا الأمر ليس غريباً! إلى جانب تناول الدواء الذي وصفه الطبيب لعلاج الإصابة بالديدان، فإن النظافة الصحية السليمة مهمة لمنع الإصابة بالعُدوى مجدداً.

- يجب غسل اليدين جيداً بعد كل مرة تستخدم فيها المراض.
- علّم ابنك المواظبة على غسل اليدين، سواء في المدرسة أو في الحضانة.
- فالنظافة الصحية الدقيقة في منطقة الشرج أمرٌ ضروريّ.

يمكنك العثور على المزيد من النصائح المتعلقة بالنظافة الصحية في المنزل وغير ذلك من المعلومات المفيدة في دليلنا الخاص بالمرضى المصابين بالديدان الدبوسية. اسأل طبيبك، أو اسأل في الصيدلية عن ذلك.

