





Mode d'emploi des bandelettes diagnostiques


Il est impératif d'utiliser les bandelettes diagnostiques le matin, avant le premier passage aux toilettes et avant de vous laver.

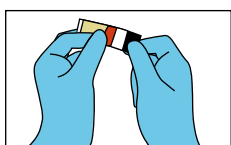

Retirez d'abord le film protecteur marqué en noir. Pour ce faire, tenez fermement les bandelettes marquées en rouge et blanc.

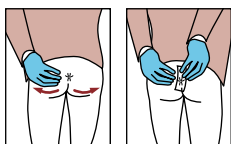

Écartez les fesses. Appuyez plusieurs fois la surface adhésive dégagée de la bandelette diagnostique marquée en rouge sur la peau de la région anale.

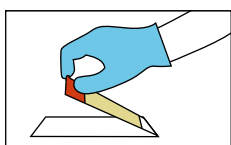

Après le prélèvement, fixez la bandelette diagnostique, face adhésive vers le bas, sur une lame de microscope. Le film blanc se trouvera alors sur le dessus.

Résultat du test positif ?

Ne paniquez pas, ce n'est pas inhabituel ! En plus de prendre le médicament prescrit par votre médecin contre l'infestation par les vers, une hygiène rigoureuse est importante pour éviter toute réinfection.

- Les mains doivent être soigneusement lavées après chaque passage aux toilettes.
- Apprenez aux enfants à se laver les mains régulièrement, également à l'école ou à la maternelle.
- Une hygiène minutieuse de la région anale est essentielle.

Vous trouverez d'autres conseils d'hygiène pour la maison et des informations utiles dans notre guide du patient sur les oxyures. Demandez-le à votre médecin ou à votre pharmacien.

