



Istruzioni per l'uso delle strisce diagnostiche


È fondamentale utilizzare le strisce diagnostiche al mattino, prima di andare in bagno per la prima volta e prima di lavarsi.

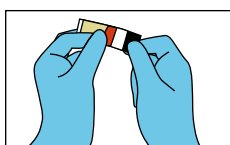

Per prima cosa, rimuovere la pellicola protettiva contrassegnata in nero. A tale scopo, tenere saldamente le strisce contrassegnate in rosso e bianco.

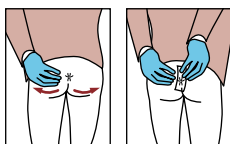

Allargare le natiche. Premere più volte la superficie adesiva esposta della striscia diagnostica contrassegnata in rosso sulla pelle della regione anale.

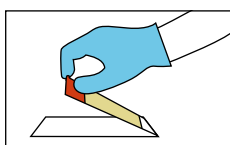

Dopo aver prelevato il campione, fissare la striscia diagnostica, con il lato adesivo rivolto verso il basso, su un vetrino da microscopio. La pellicola bianca si troverà ora sulla parte superiore.

Esito del test positivo?

Niente panico, non è insolito! Oltre ad assumere il farmaco prescritto dal medico contro l'infestazione da vermi, è importante una corretta igiene per evitare reinfezioni.

- Le mani devono essere lavate accuratamente dopo ogni utilizzo del bagno.
- Insegnare ai bambini a lavarsi regolarmente le mani, anche a scuola o all'asilo.
- Un'igiene accurata della zona anale è fondamentale

Può trovare ulteriori consigli sull'igiene in casa e informazioni utili nella nostra guida per il paziente sugli ossiuri. Si rivolga al suo medico o al suo farmacista.

