



## Инструкция по применению диагностических полосок


Необходимо использовать диагностические полоски утром, до первого посещения туалета и до умывания.

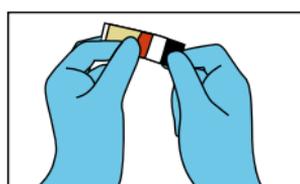

Сначала удалите защитную пленку с черной маркировкой. Для этого крепко держите полоски с красной и белой маркировкой.

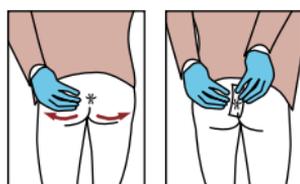

Раздвиньте ягодицы. Несколько раз прижмите освободившуюся клейкую поверхность диагностической полоски с красной маркировкой к коже в анальной области.

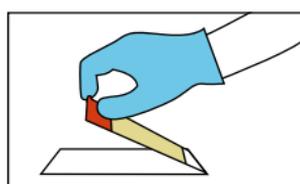

После взятия пробы закрепите диагностическую полоску клейкой стороной вниз на предметном стекле. Теперь белая пленка окажется сверху.

## Положительный результат теста?

Без паники, это не является чем-то необычным! Помимо приема назначенного врачом лекарства от глистной инвазии, важна правильная гигиена для предотвращения повторного заражения.

- После каждого посещения туалета необходимо тщательно мыть руки.
- Приучайте детей регулярно мыть руки также в школе или в детском саду.
- Тщательная гигиена анальной области крайне важна.

Дополнительные советы по гигиене в быту и полезную информацию вы найдете в нашей памятке для пациентов об острицах. Спросите о ней у вашего врача или в аптеке.

