



Instrucciones de uso de las tiras reactivas


Es fundamental utilizar las tiras reactivas por la mañana, antes de ir al baño por primera vez y antes de lavarse.

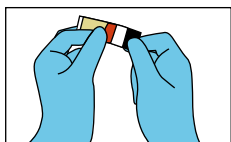

Primero, retire la película protectora marcada en negro. Para ello, sujete firmemente las tiras marcadas en rojo y blanco.

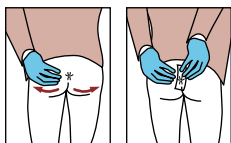

Separe las nalgas. Presione varias veces la superficie adhesiva expuesta de la tira reactiva marcada en rojo sobre la piel de la región anal.

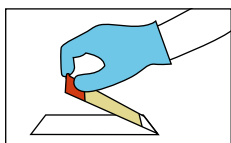

Tras la toma de la muestra, fije la tira reactiva, con la cara adhesiva hacia abajo, sobre un portaobjetos. La lámina blanca quedará ahora en la parte superior.

¿Resultado del test positivo?

Una infestación parasitaria es una situación que ocurre con frecuencia y es tratable. Además de tomar la medicación prescrita por su médico para la infestación parasitaria, es importante mantener una higiene adecuada para evitar reinfecciones.

- Las manos deben lavarse cuidadosamente después de cada uso del baño.
- Indique a los niños que se laven las manos con regularidad también en el colegio o en la guardería.
- Una higiene meticulosa de la zona anal es esencial.

Encontrará más consejos de higiene para el hogar e información útil en nuestra guía para el paciente sobre los oxiuros. Consulte a su médico o farmacéutico.

