



## Інструкція для застосування діагностичних смужок


Обов'язково використовуйте діагностичні смужки вранці, перед першим відвідуванням туалету та перед миттям.

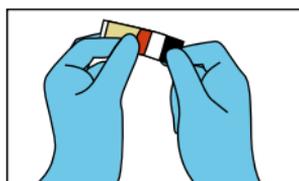

Спочатку зніміть захисну плівку з чорною позначкою. Для цього міцно тримайте смужки з червоною та білою позначками.

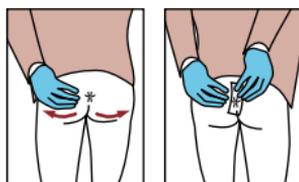

Розсуньте сідниці. Кілька разів притисніть звільнену клейку поверхню діагностичної смужки з червоною позначкою до шкіри в анальній ділянці.

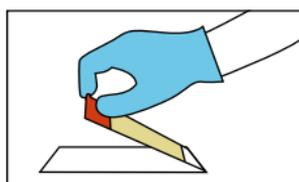

Після взяття зразка зафіксуйте діагностичну смужку клейкою стороною донизу на предметному склі. Тепер біла плівка буде зверху.

## Позитивний результат тесту?

Без паніки, це не є чимось незвичайним! Окрім прийому призначених лікарем медикаментів проти глистової інвазії, належна гігієна є важливою для запобігання повторному зараженню.

- Після кожного відвідування туалету необхідно ретельно мити руки.
- Привчайте дітей регулярно мити руки також у школі чи дитячому садку.
- Ретельна гігієна анальної області є надзвичайно важливою.

Більше порад щодо побутової гігієни та корисну інформацію ви знайдете в нашому посібнику для пацієнтів про гостриків. Зверніться за ним до свого лікаря або в аптеку.

